

*Przed wykonaniem badania dokładnie zapoznaj się z ulotką.*

## **PINK Strip**

*Paskowy test ciążowy do użytku domowego*

PINK Strip jest szybkim i wysoce czułym testem ciążowym służącym do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) – hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży.

Wykonanie badania testem PINK Strip jest bardzo proste, a wynik w postaci barwnych prążków na teście paskowym uzyskuje się w czasie 3 minut.

Test ciążowy PINK Strip należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (15 – 30°C). Nie zamrażać. Nie używać testu po terminie ważności.

Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone.

Test wyjąć z foliowego opakowania bezpośrednio przed wykonaniem badania.

### **JAK WYKONAĆ BADANIE TESTEM CIĄŻOWYM PINK Strip**

Badanie wykonuje się ze świeżo pobranego moczu. Do badania najlepiej nadaje się mocz poranny, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu hCG.

Badany mocz należy pobrać do czystego i suchego naczynia.

- Tuż przed wykonaniem badania otworzyć foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Wyjąć pasek testowy chwytając za jego górną część. Zwrócić uwagę, aby nie dotykać palcami pozostałej części testu. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.
- Pasek testowy zanurzyć w badanym moczu do odpowiedniej głębokości – **tylko do linii MAX** (nie wolno zanurzać powyżej tej linii).
- Po upływie **10 do 15 sekund** wyjąć pasek testowy z badanego moczu i umieścić go na poziomej powierzchni.
- Odczekać, aż pojawią się barwne (różowe) prążki. Wynik testu odczytać po **3 minutach** od momentu zanurzenia paska testowego w moczu. Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekać jeszcze 1 minutę. Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.

Wytwórca:  
PTH HYDREX Sp. z o.o.  
ul. T. Zana 4  
04-313 Warszawa



Data ostatniej weryfikacji ulotki: 20.12.2007.

## JAK INTERPRETOWAĆ WYNIK TESTU CIĄŻOWEGO PINK Strip

### Wynik dodatni (ciąża) (Rys. 1)


Pojawiają się dwa wyraźne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka T jest taka sama lub słabsza niż intensywność barwy prążka C. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie jesteś w ciąży.

### Wynik ujemny (brak ciąży) (Rys. 2)

Pojawia się prążek kontrolny C, prążek testowy T nie pojawia się. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie nie jesteś w ciąży.

### Wynik niejednoznaczny (Rys. 3)

W przypadku, gdy nie pojawia się żaden prążek lub pojawia się tylko prążek testowy T, wynik testu jest niejednoznaczny i należy powtórzyć badanie używając nowego testu paskowego, ściśle przestrzegając instrukcji użycia.

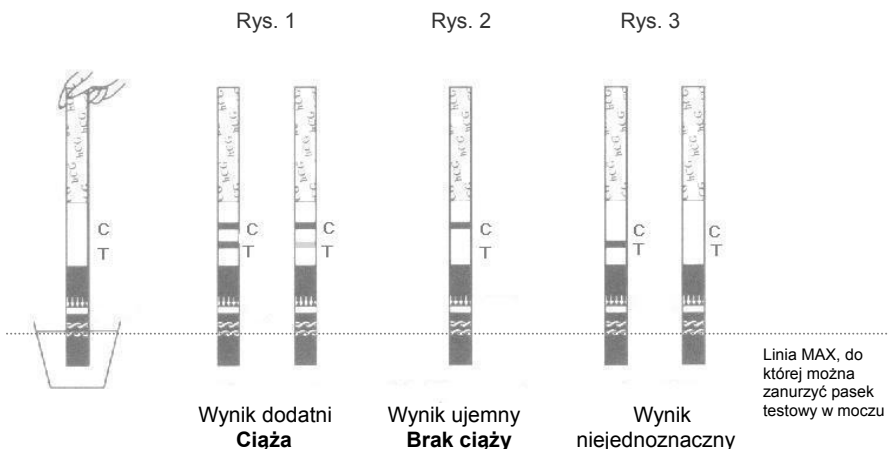

## ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA

- 1. Na czym polega działanie testu ciążowego?**  
Test ciążowy wykrywa w moczu hormon hCG (ludzką gonadotropinę kosmówkową). Hormon ten organizm kobiety zaczyna wytwarzać, jeśli jest ona w ciąży. W miarę rozwoju ciąży ilość hormonu hCG w moczu wzrasta.
- 2. Kiedy powinnam wykonać badanie testem ciążowym, jeśli spodziewam się, że jestem w ciąży?**  
Badanie testem ciążowym PINK Strip możesz wykonać już po 6 dniach od momentu spodziewanego zapłodnienia. Jednak najlepiej wykonać je pierwszego dnia po terminie spodziewanej miesiączki.

### 3. Czy muszę wykonywać badanie z moczu porannego?

Badanie testem PINK Strip możesz wykonać o każdej porze dnia, jednak najlepiej z moczu porannego, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu hCG.

### 4. Jak dokładny jest test ciążowy PINK Strip?

Z przeprowadzonych badań klinicznych wynika, że testem ciążowym PINK Strip uzyskuje się wyniki dokładne w ponad 99,9%.

### 5. Jak czuły jest test ciążowy PINK Strip?

PINK Strip wykrywa hormon hCG o stężeniu równym lub wyższym niż 25 mIU/ml. PINK Strip został wystandaryzowany wobec WHO International Standard. Przebadano jak obecność innych hormonów w moczu wpływa na wynik testu ciążowego. Okazało się, że na wynik testu PINK Strip nie ma wpływu LH (do ilości 300 mIU/ml), FSH (do ilości 1000 mIU/ml) i TSH (do ilości 1000  $\mu$ IU/ml).

### 6. Skąd wiem, że test działa prawidłowo?

Pojawienie się barwnego prążka w strefie kontrolnej C świadczy o tym, że test, który stosowałaś, działa prawidłowo. Obecność prążka kontrolnego C świadczy również o tym, że badanie zostało wykonane prawidłowo.

### 7. Jakie czynniki mogą wpływać na wynik testu ciążowego?

Przyjmowanie leków zawierających hormon hCG (takich jak Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) może prowadzić do otrzymania wyników fałszywie dodatnich. Alkohol, doustne środki antykoncepcyjne, środki przeciwbólowe, antybiotyki lub leki hormonalne nie zawierające hCG nie powinny wpływać na wynik.

Poza tym w przypadku niektórych schorzeń, np. torbieli jajnika, ciąży pozamacicznej mogą występować podwyższone poziomy hCG, co może prowadzić do uzyskania wyniku fałszywie dodatniego.

### 8. Co powinnam zrobić, jeśli wynik testu ciążowego wskazuje na to, że nie jestem w ciąży?

Jeśli uzyskasz ujemny wynik testu ciążowego, to znaczy, że w twoim moczu nie został wykryty hormon hCG i prawdopodobnie nie jesteś w ciąży. Jeśli w ciągu tygodnia miesiączka nie pojawi się, wykonaj badanie nowym testem ciążowym. Jeśli ponownie uzyskasz wynik ujemny, a twoja miesiączka nie pojawi się, udaj się do lekarza po poradę.

### 9. Co powinnam zrobić, jeśli wynik testu ciążowego wskazuje na to, że jestem w ciąży?

Dodatni wynik testu ciążowego świadczy o tym, że w twoim moczu występuje hormon hCG i prawdopodobnie jesteś w ciąży. Powinnaś udać się do lekarza, aby to potwierdzić i dowiedzieć się, jak należy dalej postępować.

**Aby zwiększyć szanse na prawidłowy przebieg ciąży i na zdrowe dziecko powinnaś odżywiać się racjonalnie, nie spożywać alkoholu i nie palić papierosów.**