

Przed wykonaniem badania dokładnie zapoznaj się z ulotką.

PINK Midstream

Test ciążowy strumieniowy do użytku domowego

PINK Midstream jest szybkim i wysoce czułym testem ciążowym służącym do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) – hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży.

Wykonanie badania testem PINK Midstream jest bardzo proste, a wynik w postaci barwnych prążków w okienku wynikowym uzyskuje się w czasie 3 minut.

Test ciążowy PINK Midstream należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (15 – 30°C). Nie zamrażać. Nie używać testu po terminie ważności.

Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone.

Test wyjąć z foliowego opakowania bezpośrednio przed wykonaniem badania.

BUDOWA TESTU CIĄŻOWEGO STRUMIENIOWEGO



Wytwórca:
PTH HYDREX Sp. z o.o.
ul. T. Żana 4
04-313 Warszawa

CE 1434


Data ostatniej weryfikacji ulotki: 20.12.2007.

JAK WYKONAĆ BADANIE TESTEM CIĄŻOWYM PINK MIDSTREAM

Badanie najlepiej wykonywać z moczu porannego, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu hCG.

- Tuż przed wykonaniem badania otworzyć foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Wyjąć test strumieniowy i zapoznać się z jego budową. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.
- Zdjąć nasadkę i skierować końcówkę testu pod strumień moczu na około 10 sekund.
Ważne: Należy zwrócić uwagę, aby mocz nie dostał się bezpośrednio do okienka testowego i kontrolnego testu.
Można również zebrać mocz do suchego i czystego naczynia i zanurzyć w nim na około 10 sekund samą końcówkę testu.
- Po wyjęciu końcówki testu z badanego moczu, nałożyć nasadkę i umieścić test na poziomej powierzchni tak, aby widoczne były obydwa okienka testu.
- Obserwować przemieszczanie się badanej próbki moczu przez strefę testową T i kontrolną C testu. Odczekać, aż w okienkach pojawią się barwne prążki.
- Wynik testu odczytać po **3 minutach** od momentu zanurzenia końcówki testu w moczu. Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekać jeszcze 1 minutę. Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.

JAK INTERPRETOWAĆ WYNIK TESTU CIĄŻOWEGO PINK MIDSTREAM

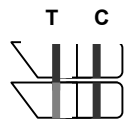


Wynik dodatni (ciąża)

Pojawiają się dwa wyraźne prążki: w okienku testowym T i okienku kontrolnym C. Intensywność barwy prążka T jest taka sama lub słabsza niż intensywność barwy prążka C. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie jesteś w ciąży.



Wynik ujemny (brak ciąży)

Pojawia się prążek w okienku kontrolnym C, w okienku testowym T nie pojawia się żaden prążek. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie nie jesteś w ciąży.

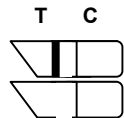

Wynik niejednoznaczny

Nie pojawia się prążek kontrolny C. W przypadku, gdy prążek kontrolny C nie pojawi się, chociaż pojawi się prążek testowy T, wynik testu jest niejednoznaczny i należy powtórzyć badanie używając nowego testu strumieniowego, ściśle przestrzegając instrukcji użycia.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA

1. **Na czym polega działanie testu ciążyowego?**
Test ciążyowy wykrywa w moczu hormon hCG (ludzką gonadotropinę kosmówkową). Hormon ten organizm kobiety zaczyna wytwarzać, jeśli jest ona w ciąży. W miarę rozwoju ciąży ilość hormonu hCG w moczu wzrasta.
2. **Kiedy powinnam wykonać badanie testem ciążyowym, jeśli spodziewam się, że jestem w ciąży?**
Badanie testem ciążyowym PINK Midstream możesz wykonać już po 6 dniach od momentu spodziewanego zapłodnienia. Jednak najlepiej wykonać je pierwszego dnia po terminie spodziewanej miesiączki.
3. **Czy muszę wykonywać badanie z moczu porannego?**
Badanie testem PINK Midstream możesz wykonać o każdej porze dnia, jednak najlepiej z moczu porannego, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu hCG.
4. **Jak dokładny jest test ciążyowy PINK Midstream?**
Z przeprowadzonych badań klinicznych wynika, że testem ciążyowym PINK Midstream uzyskuje się wyniki dokładne w ponad 99,9%.
5. **Jak czuły jest test ciążyowy PINK Midstream?**
PINK Midstream wykrywa hormon hCG o stężeniu równym lub wyższym niż 25 mIU/ml. PINK Midstream został wystandaryzowany wobec WHO International Standard. Przebadano jak obecność innych hormonów w moczu wpływa na wynik testu ciążyowego. Okazało się, że na wynik testu PINK Midstream nie ma wpływu LH (do ilości 300 mIU/ml), FSH (do ilości 1000 mIU/ml) i TSH (do ilości 1000 μ IU/ml).
6. **Skąd wiem, że test działa prawidłowo?**
Pojawienie się barwnego prążka w strefie kontrolnej C świadczy o tym, że test, który stosowałaś, działa prawidłowo. Obecność prążka kontrolnego C świadczy również o tym, że badanie zostało wykonane prawidłowo.
7. **Jakie czynniki mogą wpływać na wynik testu ciążyowego?**
Przyjmowanie leków zawierających hormon hCG (takich jak Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) może prowadzić do otrzymania wyników fałszywie dodatnich. Alkohol, doustne środki antykoncepcyjne, środki przeciwbólowe, antybiotyki lub leki hormonalne nie zawierające hCG nie powinny wpływać na wynik. Poza tym w przypadku niektórych schorzeń, np. torbieli jajnika, ciąży pozamacicznej mogą występować podwyższone poziomy hCG, co może prowadzić do uzyskania wyniku fałszywie dodatniego.
8. **Co powinnam zrobić, jeśli wynik testu ciążyowego wskazuje na to, że nie jestem w ciąży?**
Jeśli uzyskasz ujemny wynik testu ciążyowego, to znaczy, że w twoim moczu nie został wykryty hormon hCG i prawdopodobnie nie jesteś w ciąży. Jeśli w ciągu tygodnia miesiączka nie pojawi się, wykonaj badanie nowym testem ciążyowym. Jeśli ponownie uzyskasz wynik ujemny, a twoja miesiączka nie pojawi się, udaj się do lekarza po poradę.
9. **Co powinnam zrobić, jeśli wynik testu ciążyowego wskazuje na to, że jestem w ciąży?**
Dodatni wynik testu ciążyowego świadczy o tym, że w twoim moczu występuje hormon hCG i prawdopodobnie jesteś w ciąży. Powinnaś udać się do lekarza, aby to potwierdzić i dowiedzieć się, jak należy dalej postępować.

Aby zwiększyć szanse na prawidłowy przebieg ciąży i na zdrowe dziecko powinnaś odżywiać się racjonalnie, nie spożywać alkoholu i nie palić papierosów.